

MLD

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. 2x Schraube + Deckel an der Unterseite am Gelenk entfernen.
2. Hellgraue Ringe gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.
3. Rastnasen der Blende entsprechend lösen (z.B. mit Schraubenzieher).
4. Blende heraushebeln.
5. Anschlusslitzen an den Klemmen lösen.
6. Taster Flachbandkabel an der Klemme lösen.
7. LED Modul entnehmen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
Telefon +49 7720 601-0
Telefax +49 7720 601-290

www.waldmann.com
info@waldmann.com
Service-Hotline: +49 7720 601-170
Service-E-Mail: service@waldmann.com