

# ACURIA.perfect

## APA, APE

## Ausbauanleitung

### Lichtquelle

1. Mit einem kleinen Hammer, ggf. mehrfach, auf die Scheibe schlagen, bis diese springt.
2. Die Scheibe nach und nach herauskratzen.
3. Mit einem Schraubendreher die Klebung herauschaben.
4. Mit einem Staubsauger vorsichtig den Glasstaub heraussaugen.
5. Die Optik kann nun mit einem kleinen Schraubendreher herausgehoben werden.
6. Das LED-Modul kann nun mit einem kleinen Schraubendreher herausgehoben werden.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
D-78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0  
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170  
Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)